


¿QUÉ ES LA OSCILACIÓN PROFUNDA?

La oscilación profunda (también conocida con el nombre DEEP OSCILLATION® o HIVAMAT®) es un método de tratamiento único, patentado internacionalmente, no invasivo y no traumático. No tiene nada en común con otras terapias conocidas como el ultrasonido o las ondas de choque. Mediante la utilización de la atracción electrostática y fricción, los impulsos aplican al tejido un tratamiento placentero por vibraciones con importantes efectos biológicos, sin el uso de fuerzas mecánicas externas. A diferencia de otras terapias, estas vibraciones actúan de forma muy cuidadosa y en profundidad sobre todas las estructuras del tejido (piel, tejido superficial, tejidos grasos subcutáneos, músculos, fascias, vasos sanguíneos y linfáticos).

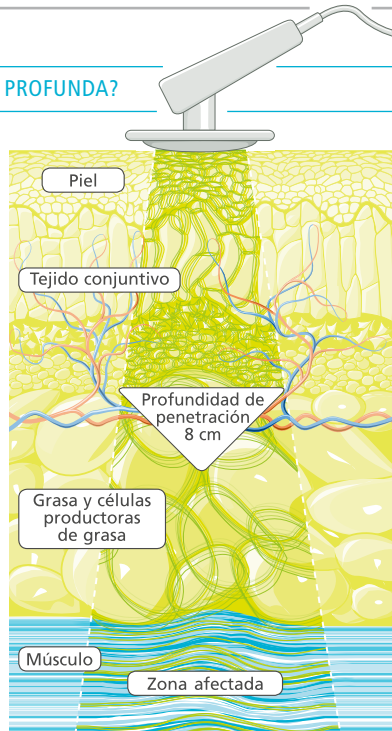

¿CÓMO SE APLICA LA OSCILACIÓN PROFUNDA?

Para realizar el tratamiento, el paciente mantiene contacto con un electrodo neutro de titanio. Utilizando guantes especiales o un aplicador manual con un diseño especial (segundo contacto), se realizan movimientos rotatorios suaves sobre el tejido creando así el agradable efecto terapéutico de la oscilación profunda.



La terapia se aplica con guantes o mediante aplicador manual.


LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO CON OSCILACIÓN PROFUNDA

- » Tratamiento ambulatorio y tasa de éxito muy alta
- » Tratamiento rápido, no invasivo, sin cirugía, ni medicación
- » Sin efectos secundarios conocidos
- » Probado durante 30 años y en uso en todo el mundo
- » Mejora de la calidad de vida a través de la reducción del dolor y la libertad de movimiento
- » Tratamiento extremadamente suave y bien tolerado, por lo tanto, aplicable en etapas tempranas
- » Gran aceptación por los pacientes
- » Influencia decisiva en la rapidez del proceso de curación



Ejemplo de aplicación de la descongestión intensiva de un paciente con lipedema.

Para preguntas y más información sobre la oscilación profunda, estamos a su disposición.

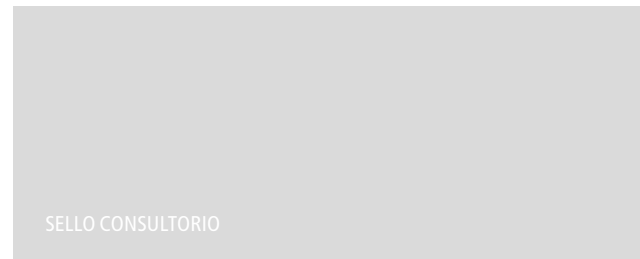

PHYSIOMED ELEKTROMEDIZIN AG · Hutweide 10 · 91220 Schnaittach · Germany
 PHONE +49 (0) 91 26 / 25 87-0 E-MAIL info@physiomed.de
 FAX +49 (0) 91 26 / 25 87-25 WEB www.physiomed.de
 www.facebook.com/physiomedelektromedizin/

Dolor, inflamación, edema o trastornos de cicatrización de heridas?



LA OSCILACIÓN PROFUNDA puede ayudar de manera rápida y efectiva!



Estimado paciente,

Todos, los que sufren de **dolor agudo o crónico, de linfe o lipoedema, fibrosis, lesión, inflamación, quemaduras, cicatrización de heridas**, saben lo que significa una limitación en su movilidad: una disminución significativa en la calidad de vida.

Es aquí, donde la oscilación profunda puede ayudar a devolver una vida libre de dolor. Probado durante casi 30 años, este método de tratamiento altamente eficaz permite un éxito rápido de la terapia sin la necesidad de medicación o intervención quirúrgica.

El éxito del tratamiento generalmente se nota después de unas pocas sesiones, por lo general luego de las dos o tres sesiones recibidas.

Este folleto le informa sobre la oscilación profunda, su modo de acción especial, las posibilidades de aplicación y la situación de evidencias y estudios clínicos.

Hable con su médico o terapeuta acerca de la posibilidad de la aplicación dirigida, suave y efectiva de la oscilación profunda.

La oscilación profunda está recomendado por:



Lymphedema Clinic Wittlinger
www.lymphedema-clinic.com

Center for excellence in lymphedema treatment
Lymphedema rehabilitation center - Treatment
Academy - Training - Research

Campos de aplicación

DOLOR

La intensidad y la calidad del dolor se reducen de forma sostenible mediante la terapia con la oscilación profunda.

- » SDRC estado I y II (enfermedad de Sudeck, síndrome del dolor regional complejo)
- » Epicondilitis (codo de golfista o lanzador)
- » Síndrome de fibromialgia
- » Lumbalgia (dolor de espalda, lumbago)
- » Trauma (como ligamentos desgarrados, fibras musculares rotas y torceduras, latigazo cervical, esguince)



INFLAMACIÓN

En el caso de estados inflamatorios, la oscilación profunda conduce rápidamente a una reducción visible del volumen. La fibrosis causada por radiación y linfedema o lipoedema pueden tratarse de manera muy efectiva, especialmente en una etapa temprana.

- » Hematoma (derrame de sangre)
- » Fibrosis (crecimiento enfermo del tejido conectivo)
- » Edema crónico, linfedema, lipoedema y lipo-linfedema



CUIDADO POSTERIOR CIRUGÍA

Debido al efecto terapéutico suave, la oscilación profunda a menudo se usa inmediatamente después del procedimiento y favorece la cicatrización rápida de heridas.

- » Endoprótesis (implante de cadera o rodilla)
- » Mama-Ca (extirpación quirúrgica del cáncer de mama y los ganglios linfáticos)
- » Osteosíntesis (fijación de los huesos)
- » Trasplante de piel



CURACIÓN SECUNDARIA DE HERIDAS

En los trastornos de curación de heridas diabéticas y quirúrgicas, la oscilación profunda se usa de manera eficiente y, a menudo, puede reiniciar el proceso de curación de heridas.

- » Úlceras de decúbito (escaras)
- » Pie diabético
- » Ulcus cruris (úlceras de la parte inferior de la pierna)

QUEMADURAS

El tratamiento con la oscilación profunda produce una curación acelerada y cualitativamente mejorada de las heridas por quemaduras.

EFICIENCIA CONFIRMADA POR MÁS DE 40 ESTUDIOS

La eficacia fisiológica de la oscilación profunda está bien documentada por numerosos estudios experimentales y clínicos. Todos los estudios, libros, guías prácticas y otras publicaciones sobre la oscilación profunda se pueden ver con el código QR en la parte inferior del sitio web en „Bibliografía“.

